

## Manuell rengöring av endoskop utan arbetskanal, vårdhygienisk riktlinje

### Inledning

**Detta är en rutin avsedd att användas endast i undantagsfall, vid avsaknad av diskdesinfektor för rhinolaryngoskop/flexibla endoskop utan arbetskanal**

Manuell rengöring och desinfektion av flexibla endoskop är omöjlig att validera och avråds ifrån ur såväl arbetsmiljö- som kvalitetsaspekter. Verksamhetschefen ansvarar för att rutin upprättas och efterföljs.

Manuell rengöring av endoskop kan medföra skada på endoskopet och stora kostnader för reparation kan uppstå. Därför bör den hanteringen undvikas om så är möjligt. Sonden på ett endoskop är mycket känslig och ska hanteras försiktigt.

### Rengöring- och desinfektionsanvisning

- Torka av endoskopet med fuktig torkduk (använd inte torkypapper) i direkt anslutning till avslutad undersökning
- I desinfektionsrummet kopplas tryckmätaren på endoskopet och läcktest genomförs
- Låt tryckmätaren vara påkopplad och sänk ner endoskopet i vatten, max 37 °C, med tillsatt låglöddrande rengöringsmedel, t. ex Sekusept Multienzym
- Rengör endoskopet mekaniskt med mjuk, luddfri torkduk (ej Torky)
- Skölj endoskopet noggrant i vatten max, 37° C
- Torka endoskopet torrt med mjuk, luddfri duk (ej Torky)
- Sänk ner endoskopet i Etanol 70% under 60 sekunder
- Koppla ifrån tryckmätaren och häng upp endoskopet på anvisad plats

Förvara endoskopet så dess renhetsgrad bevaras fram till användning, torrt och dammfritt i stängt skåp. Hantera det rena endoskopet med desinfekterade händer.