

Öronspolning EWACS öppenvård

Bakgrund	För att förhindra tillväxt av miljö- och vattenbakterier i slangen är det viktigt att ha rutiner för hur EWACS öronspolare ska skötas. Utifrån odlingssvar från slangarna har vi utarbetat dessa riktlinjer.
Slang	Tag isär alla delar och töm på vatten en gång per dag. Förvara slangen borttagen från kranen när den inte används. Slangen byts en gång i veckan. Desinfektera slang och snabbkopplingar med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid mellan varje patient.
Rondskål med koppling/slang	Rondskål/koppling/slang för returvätska till avlopp rengörs mellan varje patient. Slangen spolats igenom med vatten och rondskålen rengörs i diskdesinfektor. Slangen byts en gång i veckan.
Tryckregulator	Ska kontrolleras av MTA.
Spolpistol	Desinfektera med alkoholbaserad ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid mellan varje patient. Förvara spolpistolen bortkopplad från slangen när den inte används.
Spolmunstycke	Diskas i diskdesinfektorn mellan varje patient.
Personal	Basala Hygienrutiner.
Städning	Noggrann desinfektion med alkoholbaserad ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid av tagytor, spill på ytor/golv torkas upp direkt, avsluta med ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid.