

## Öronspolning EWACS öppenvård

<b>Bakgrund</b>	För att förhindra tillväxt av miljö- och vattenbakterier i slangerna är det viktigt att ha rutiner för hur EWACS öronspolare ska skötas. Utifrån odlingsvar från slangarna har vi utarbetat dessa riktlinjer.
<b>Slang</b>	Tag isär alla delar och töm på vatten en gång per dag. Förvara slangerna borttagen från kranen när den inte används. Slangen byts en gång i veckan. Desinfektera slang och snabbkopplingar med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid mellan varje patient.
<b>Tryckregulator</b>	Ska kontrolleras av MTA.
<b>Spolpistol</b>	Desinfektera med alkoholbaserad ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid mellan varje patient. Förvara spolpistolen bortkopplad från slangerna när den inte används.
<b>Spolmunstycke</b>	Diskas i diskdesinfektorn mellan varje patient.
<b>Personal</b>	Basala Hygienrutiner.
<b>Städning</b>	Noggrann desinfektion med alkoholbaserad ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid av tagytor, spill på ytor/golv torkas upp direkt, avsluta med ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid.