

Rengöring rektoskopitillbehör, vårdhygienisk riktlinje

Instrument och tillbehör som vid normal användning kommer i beröring med intakta slemhinnor utan att penetrera dem, ska vid användning vara minst höggradigt rena, desinfekterade, ("high level disinfection"). Produkterna ska vara fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer. Om produkterna är avsedda för flergångsbruk måste de rengöras och desinfekteras mellan användningarna med en metod som avdödar bakterier inklusive tuberkelbakterier, virus och de flesta svampsporer.

Flergångstillbehören ska hanteras och förvaras så att renhetsgraden bibehålls fram till användning.

Ett vattenavvisande engångsfilter bör användas mellan ballongen och rektoskophuvudet.

Tillbehör för flergångsbruk måste rengöras efter användning för att avlägsna organiskt material, som blod och vävnadsrester och annan smuts samt desinfekteras för att avdöda smittämnen. Desinfektion kan ske med fysikaliska eller med kemiska metoder.

Värmedesinfektion ska användas i första hand.

Ballong, rektoskophuvud samt ljuskabel:

Alternativ 1. Maskinell rengöring och desinfektion:

- Lägg delarna i en korg och diska i diskdesinfektor. Efter avslutat program kan delarna torkas av med Ethanol 70% för att få dem torra. Ballongen hängs med fördel i torkskåp för att torka invändigt

Alternativ 2. Manuell rengöring och desinfektion:

- Rengör delarna i mildt rengöringsmedel och vatten, skölj med vatten och torka torrt. Ballongen hängs med fördel i torkskåp för att torka invändigt
- Lägg de torra delarna i desinfektionslösning t ex. Ethanol 70% i 10 minuter alternativt Isopropanol 45% i 15 min