

Orion metro från Invacare

Introduktion



Verktyg som behövs för inställningar


- stjärnmejsel



- två 17 mm spärr- eller fasta nycklar



- 12 mm fast nyckel

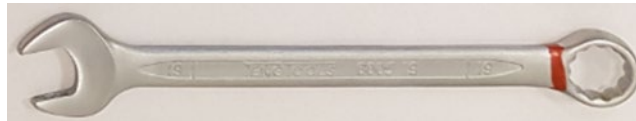

- 6 mm insexnyckel






Allmän information

- 10 km/h
- Markfrigång: 8 cm
- Hindertagning: 8 cm
- Totallängd: 124 cm
- Totalbredd: 66 cm (OBS! 68.5 cm om armstöden är max breddade)
- Max brukarvikt: 136 kg
- Sittdjup: 47 cm
- Ryggstödshöjd: 49 cm
- Sittbredd: 51 cm

Justering av sitthöjd

- Ta bort sätet genom att hålla in sitsvridningen och vrid sitsen. Lyft sedan rakt upp.
- Lyft av kåpan (sitter fast med kardborre)
 - 1: Vinkla ut och lyft upp i bakkant
 - 2: Lossa kåpan i framkant
 - 3: Lyft kåpan rakt upp, manschetten ger vika för sittstolpen

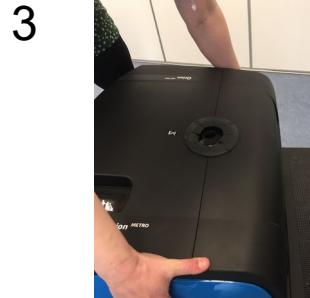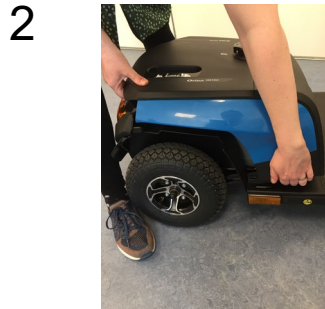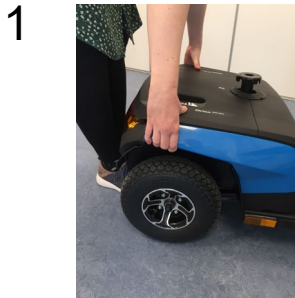

- Lossa mutter och skruv och välj lämplig sitthöjd, 44.5 cm, 47 cm, 49.5 cm eller 52 cm.

Justeringar av armstöden


Armstödshöjd

Använd stjärnmejsel och skruva ut skruven i bakkant på armstödet. Det finns fyra höjder att välja på. Vid beställning anger du hur många hål som är synliga (0-3 st)



Armstödsvinkel

Fäll upp armstödet och lossa mutter och skruv. När rätt vinkel har hittats låser du justeringen med att dra åt muttern.

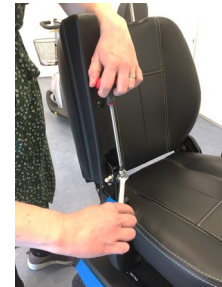

Sittbredd/Bredd mellan armstöd


Justera ut armstöden med vredet under sitsen vid behov från 50-55 cm.



Övriga funktioner på sitsen

- Sitsglidning
- Ryggstödsvinkel
- Sitsvridning

Kontrollpanelen

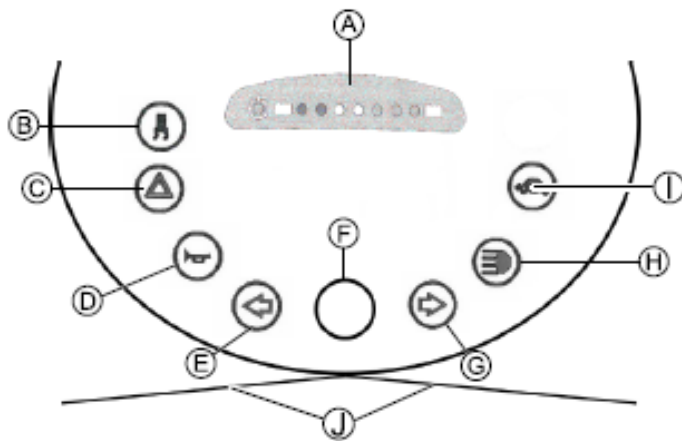

(A)	Statusdisplay
(B)	Aktivera/inaktivera kurvkontroll (hastighetssänkning vid körning i kurva)
(C)	Varningsblinkers
(D)	Signalhorn
(E)	Vänster körriktningvisare (stängs av automatiskt efter 30 sekunder)
(F)	Hastighetspotentiometerns mätare
(G)	Höger körriktningvisare (stängs av automatiskt efter 30 sekunder)
(H)	Belysning
(I)	Låghastighetsläge
(J)	Joystick

Övrig information

- Knapp för fartreducering i kurvor. Med denna knapp reduceras farten när stolen svänger. Håll in knappen för att aktivera/inaktivera funktionen.
- Låghastighetsläge (knapp med sköldpadda på) reducerar hastigheten.
- Orion Metro har bättre stötdämpning jämfört med Fortress Calypso.
- Orion Metro har högre insteg än Fortress Calypso. Insteget är cirka 17 cm på Orion Metro jämfört med 13 cm på Fortress Calypso.