

Nyheter i Handi Go v1.4

Sammanfattning

Nyheter i Handi Go v1.4

Nya funktioner för personlig anpassning

1. Välj mellan notis och helskrämslarm – Skillnad mellan Android och iOS
2. Visa eller dölj Uppgifter och Utkast
3. Välj egna namn på kategorifärgerna


Nya funktioner för förbättrad användarvänlighet

4. Se nationella helgdagar och högtidsdagar
5. Öppna webblänkar direkt från en anteckning
6. Se datum när aktiviteten eller uppgiften öppnas


Android - Välj mellan notis och helskärmslarm

Det nya helskärmslarmet i Handi Go är utformat för att vara svårt att missa även när telefonen är låst. På Android-telefoner visas Handi Go's egen larmvy oavsett om telefonen är låst eller inte.


Välj larmtyp i Inställningar

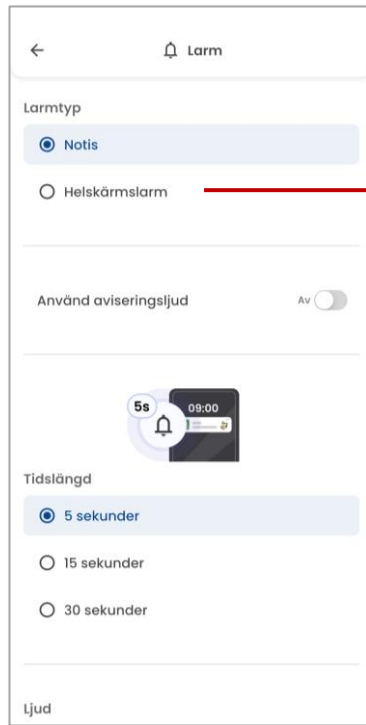

Notis

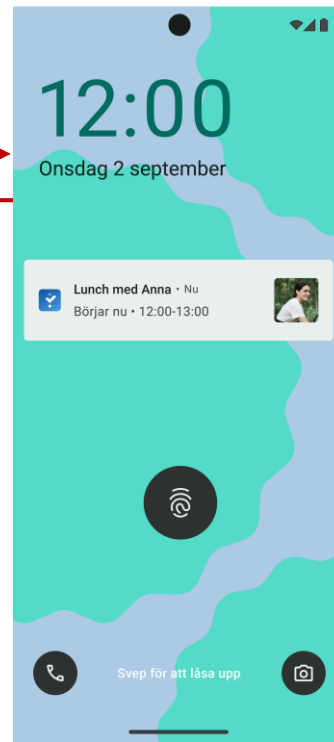

Helskärmslarm

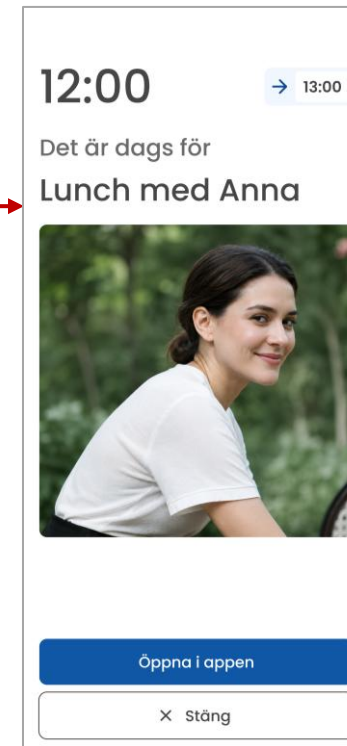


- Samma helskärmslarm oavsett om skärmen är låst eller inte

- Välj även larmets ljud och tidslängd
- Gäller för både notis och helskärmslarm

iOS: Välj mellan notis och helskrmslarm

På iPhone används telefonens Alarm-funktion för att ge extra tydliga aktivitetslarm från Handi Go. Funktionen Helskrmslarm finns tillgängligt från iOS 26, medan äldre iOS-versioner fortsatt använder vanlig notis. *September 2026: Ca 80% av svenska iPhone-användare har iOS 26.*

Välj larmtyp i Inställningar

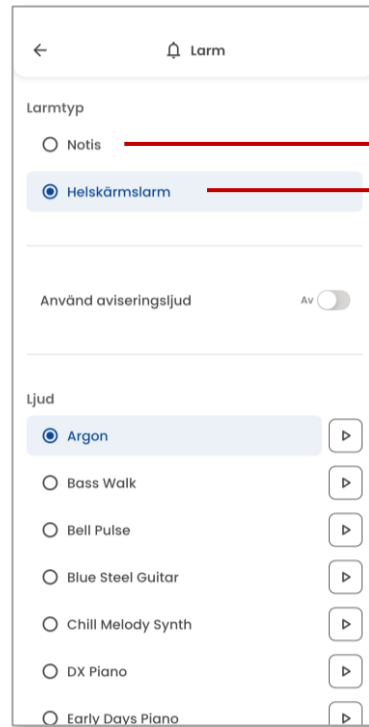

Notis




Helskrmslarm

Låst skärm



Upplåst skärm

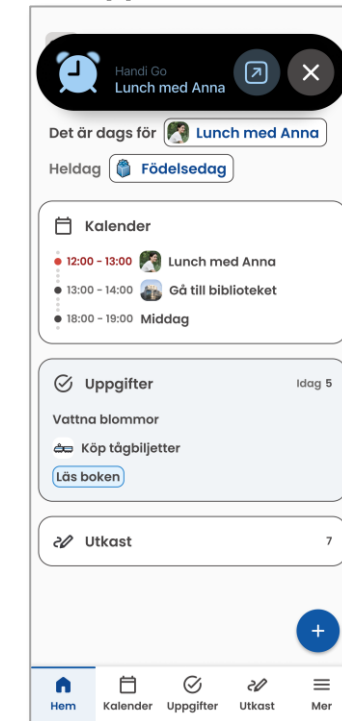

- För helskrmslarm kan ljud väljas
- För notis kan både ljud och tidslängd väljas


- Är samma som den inbyggda Alarm-funktionen i iPhone
- Visar inte aktivitetens ev bild
- Larmar tills användaren stoppar själv

Visa eller dölj Uppgifter och Utkast


Nu är det möjligt att välja om Utkast och Uppgifter ska visas eller döljas.

På så sätt kan Handi Go förenklas för användare som inte behöver dessa funktioner.

Alla funktioner visas på hemskärmen

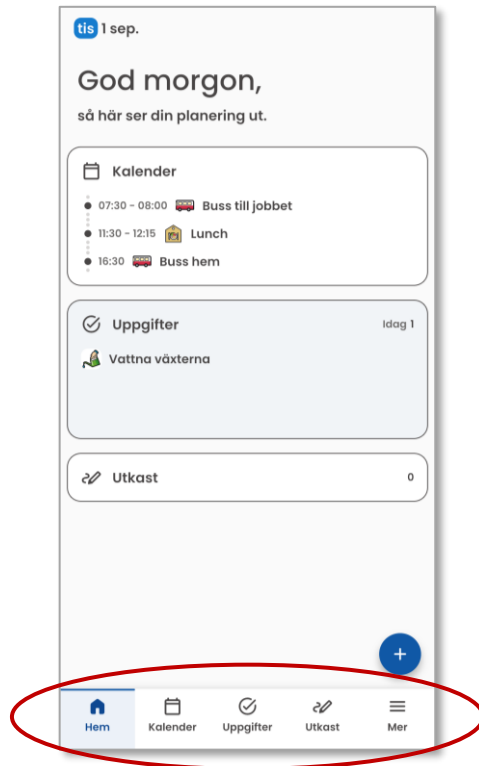

Välj bort i Inställningar → Funktionerna döljs på hemskärmen

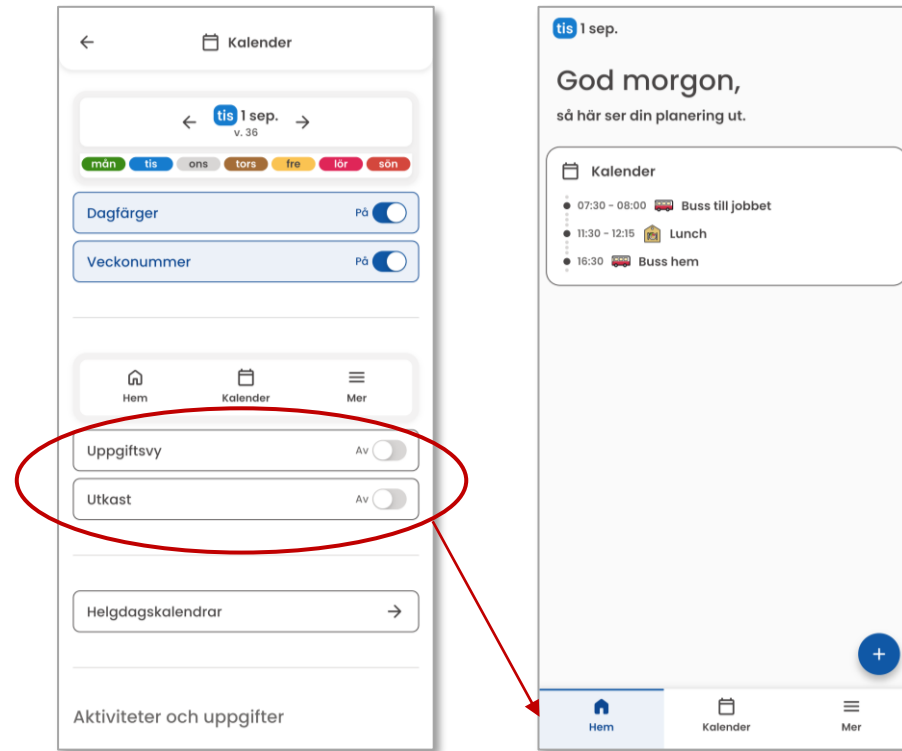


- Standardinställningen är att visa Uppgiftsvisy och Utkast
- Även om uppgiftsvisyn döljs visas ev uppgifter fortfarande i kalendervyn


Välj egna namn på kategorifärgerna

Nu är det möjligt att välja egna namn på kategorifärgerna, som förklaring vad den specifika färgen betyder. Namnen anges i Handi Go och speglas i myAbilia.

Ändra till eget namn på färgerna

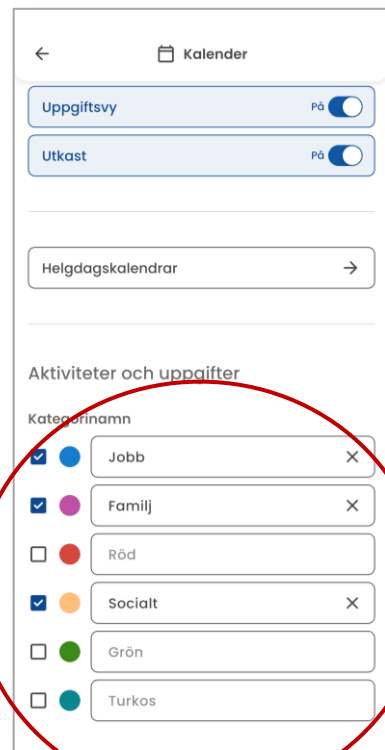

Ny aktivitet – Välj färg

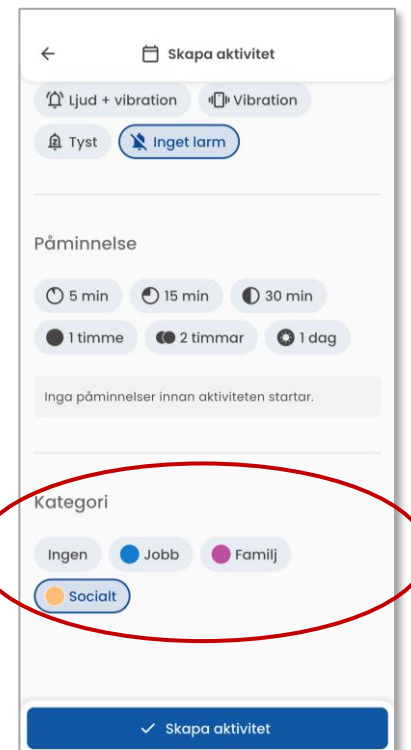

Se färgens namn i aktiviteten




- Välj vilka färger som ska ha eget namn
- Välj vilka färger som ska visas

Se nationella helgdagar och högtidsdagar

Nu kan nationella helgdagar och högtidsdagar visas i kalendern.

Helgdagskalendern är utvecklad av Abilia och innehåller bildstöd för samtliga dagar.

Välj önskad helgdagskalender i Inställningar

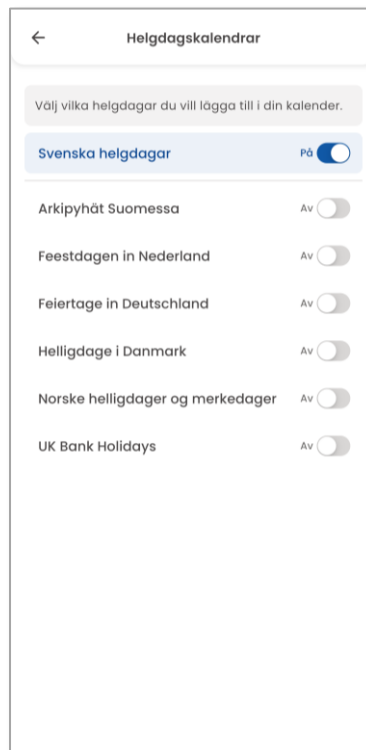


Helgdagarna visas som heldagsaktiviteter




Öppna webblänkar direkt från en anteckning

Nu blir webblänkar i anteckningar klickbara och kan öppnas direkt i telefonens webbläsare. Det gör det enklare att komma vidare till t ex en webbsida eller annan information som hör till aktiviteten eller uppgiften.


Kopiera webblänk

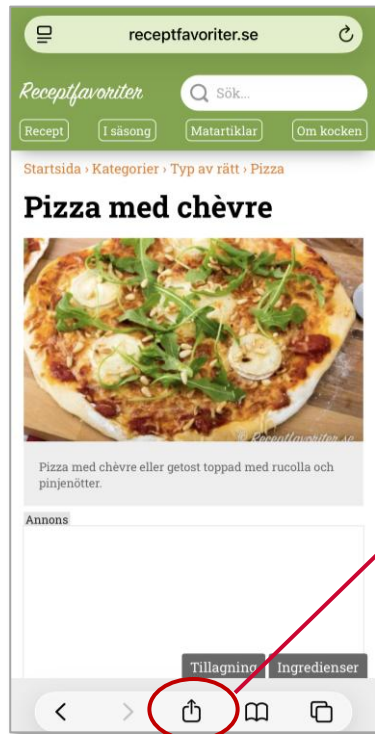

Klistra in i anteckningen

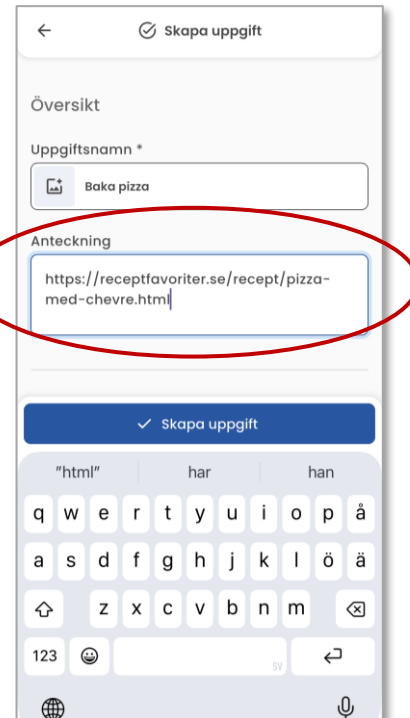

Klicka på länken i uppgiften

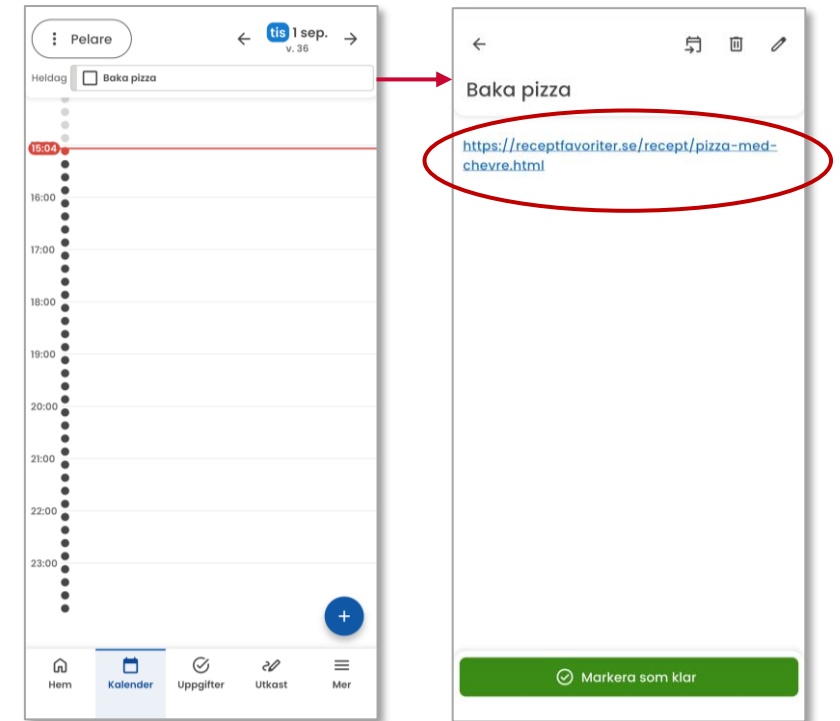

Se datum när aktiviteten eller uppgiften öppnas

När aktiviteten eller uppgiften öppnas kan man nu se dess datum. Det gör det enklare att komma ihåg var man var, till exempel när man byter mellan appar.

Handi Go v1.3



Handi Go v1.4



**Rätt hjälpmedel i rätt tid
kan göra verklig skillnad**



Abilia AB | www.abilia.se | info@abilia.se | 08-594 694 00