

Nyheter i MEMOplanner version 4.4

0



C

mandag 12 september 2022

ABILIA

Nyheter i MEMOplanner v4.4

1. Förbättrat kognitivt stöd

- Ny funktion: Timer i aktivitet*
- Ny funktion: Fristående checklistor
- Tydligare visning av checklistornas uppgifter
- Tydligare visning av heldagsaktiviteter i månadsvyn

2. Snabbare daglig planering

- Möjlighet att kopiera aktivitet
- Möjlighet att spara aktivitet som mall

3. Förbättrad kontohantering

- Utökad guide för att skapa konto*
- Ändra kontouppgifter i MEMOplanner
- * Motsvarande nyhet även i webbtjänsten myAbilia

Nu kan en timer läggas in i en aktivitet. Det gör det möjligt att starta en förinställd nedräkning i samband med att aktiviteten börjar, istället för att ha en fast sluttid för aktiviteten.

tisdag tisdag eftermiddag ¹⁰ 2 ³ ⁸ 7 6 5 eftermiddag Ŧ 22 april 2025 22 april 2025 Höger Vänster 14:30 Tvätten klar Fristående timer 48:57 Spela Spela 14:30 Aktivitet med timer ,D 0 ()0000000 \odot 15 Starta 15 min 20 25 0 30 Meny Larm Dag Månad Vecka Aktivitet Timer Checklistor Radera 1

Aktivitet med timer

∫∑≻ Larm √∑≻ Larm 14:30 14:30 Spela Spela 10 \odot 00:30:00 15 15 Starta 20 25 25 30 30 × Stäng × Stäng

Starta nedräkningen när aktiviteten börjar



Timern läggs in i aktiviteten i samband med att den skapas. Man kan skapa en ny timer eller välja från mall.



Lägg in ny timer Välj timer från mall Ny aktivitet Lägg in timer Från mall Borsta tänderna 00:00:00 Datortid 30:00 Tvätten klar 01:00:00 55 5 minuter 05:00 50 10 minuter 10 10:00 15 minuter 15:00 15 -45 20 minuter 20:00 20 [`]40 25 35 30 < Tillbaka imes Avbryt

Skapa aktivitet – lägg in timer

Nu finns det en ny funktion som gör det möjligt att använda checklistor utan koppling till aktiviteter.



Översikt	Använd checklistan
Checklistor	Checklistor Handla
Kom ihåg	Handla
	Applen 5 st
	🗖 🥓 Bröd
	✓ Mjölk 2 st
	Tandborste
	Toapapper
Lagg till	
	Appre Borlera Aprica Stan
× Stäng	
Användarens fristående checklistor	 Bocka av utförda uppgifter Avmarkera alla uppgifter Ändra/ta bort checklistan

Ändra checklistan



Ändra checklistans namn, bild och uppgifter





När man skapar en fristående checklista kan man välja att göra en helt ny checklista eller välja från mall. Mallarna skapas i MEMOplanner eller via myAbilia.



Skapa fristående checklista



Checklistor (mallar) i myAbilia

Sedan tidigare kan checklistor för aktiviteter hanteras i myAbilia - nu kan de även användas som mall för fristående checklistor.



Mallar i MEMOplanner

Via ny flik i Mallar kan nu checklistor administreras motsvarande som i myAbilia.



Spara checklista som mall

Fristående checklistor kan sparas som ny mall och visas då i Mallar och i myAbilia.

	✓ Ändra checklista	
	Bild Namn	
	rianula	
	Äpplen 5 st	
	Bröd	
	Mjoik 2 st	
	Toapapper	
	+ Ny uppgift	
\langle	Spara som ny mall	>
	X Avbryt 🗸 Spara	

Tydligare visning av checklistornas uppgifter

Visningen av checklistornas uppgifter har gjorts mera tydlig:

- Ibockningsrutan visas nu till vänster och därmed visuellt närmare uppgiften
- Uppgifterna blir inte längre överstrukna när de bockas av

	🏠 Larm	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	15:00	
	Kom ihåg	
🔑 nyckel		~
👼 portmonnä		
wobiltelefon		
🤄 frukt		~
	X Stäng	

Nuvarande visning (v4.3)

15:00 Kom ihåg mobiltelefon		🏷 Larm	10 9 8 7 6 15:0
Kom ihåg Kom ih		15:00	
 portmonnä mobiltelefon frukt 		Kom ihåg	
portmonnä Symbolitelefon Key frukt	🔽 🄑 nyckel		
Mobiltelefon Mobiltelefon Mobiltelefon	🗆 🌏 portme	onnä	
🗹 🧐 frukt	🔲 🖏 mobili	telefon	
	🗹 🥙 frukt		

ABILIA

Tydligare visning av heldagsaktiviteter i månadsvyn

ABILIA

Om det finns fler än en heldagsaktivitet per dag i månadsvyn, visas de nu på ett tydligare sätt.





Nu är det möjligt att kopiera aktiviteter eller spara aktiviteter som mallar. Detta kan bidra till att den dagliga planeringen blir snabbare och enklare.

Ändra aktivitet – Välj sedan åtgärd







Aktiviteten kopieras till önskad dag/dagar

Spara aktivitet som mall			
☆ Mallar			
Aktiviteter Timers Checklistor			
Spela			
۲۵۴۲ Vakna			
Mat			

Aktiviteten sparas till funktionen Mallar

Förbättrad kontohantering - Utökad guide för att skapa konto

Nu ingår det fler steg i guiden "Skapa konto": Lägg till kontaktuppgifter samt Lägg till stödpersoner

- Tack vare inlagda kontaktuppgifter kan man återställa lösenord samt få (framtida) meddelanden från myAbilia
- Tack vare möjligheten att lägga in stödpersoner direkt i MEMOplanner görs denna funktion mera tillgänglig

		<pre><new></new></pre>	<u>SNEW2</u>
	尘 Skapa konto	Steg 1/2	
MEMO planner	Användarnamn (minst 3 tecken)	Lägg till kontaktuppgifter	
Använd ditt myAbilia-konto för att logga in Användamamn	Lösenord (minst 12 tecken)	Användarnamn mp44	
		E-postadress Telefonnummer	
Lösenord	Jag har läst och godkänner användarvillkor	E-postadress	
Logga in	Jag har läst och godkänner <u>personuppgiftspolicy</u>		ng ABILIA
			Lägg till stödperson Du kan lägga till stödpersoner senare via inställni
Har du inte ett myAbilia konto annu? Skapa konto		En verifieringskod kommer att skickas till den tillagda e-postadressen.	
	< Tillbaka till login Nästa →	X Lägg till senare Nästa →	X Hoppa över + Lägg
ABILIA			

 Välj ett användarnamn som är lätt att komma ihåg

- Kontaktuppgifter är inget krav, men rekommenderas
- Kan vara e-postadress och/eller mobilnummer
- Kan läggas till senare

- Stödpersoner kan läggas till senare (om så önskas)



Lägg in kontaktuppgifter – Gör så här



För att kunna lägga till en kontaktuppgift behöver man bekräfta att den tillhör avsedd person = verifieras. Personens e-postprogram eller mobiltelefon behöver alltså samtidigt finnas tillgänglig.



1. Välj e-postadress eller mobilnummer

- 2. Ta emot verifieringskodvia vald kontaktmetod(e-postprogram eller telefon)
- 3. Skriv in verifieringskoden i MEMOplanner

Förbättrad kontohantering – Ändra kontouppgifter i MEMOplanner

ABILIA

Användarens kontaktuppgifter och stödpersoner kan nu hanteras via **Inställningar|System**. Om kontaktuppgifter saknas visas en meddelanderuta med vänlig uppmaning att lägga till dem.

Kontouppgifterna kan även hittas via menyn.

Ändra kontouppgifterna





Se information om kontot

Uppdatering av MEMOplanner och MEMOplanner Go



- När det finns en ny programversion och enheten är ansluten till internet uppdateras MEMOplanner automatiskt
 - När den inte stör användningen av MEMOplanner
 - Även om licensperioden har löpt ut
- Programuppdatering kan även göras manuellt via Inställningar

MEMOplanner Go

• Appen uppdateras automatiskt om så är inställt på telefonen, se inställningar för App Store respektive Google Play





Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad



Abilia AB | www.abilia.se | info@abilia.se | 08-594 694 00