



Sarepta 2 med XK-12

Sarepta 2 har stöd för en adapter som heter XK-12 och ingår i en serie produkter som heter XKEYS, tillverkade av P I Engineering.

Till den kan man koppla in upp till 12 externa brytare. Sarepta 2 kan användas med 2 upp till 5 brytare. Adaptern har sex vanliga 3.5 mm hörlursuttag märkta 1 till 6.



Denna manual visar hur SwitchSendXKeys fungerar med Sarepta 2 version 2.00.167.

SPRIDA har testat och verifierat lösningen för Windows 7 – Windows 10. Små förändringar i produkt eller Windows kan förändra funktion. SPRIDA ansvarar inte för support eller felsökning mer än vad som ges i detta dokument.

Inköp

Adaptern XKEYS med beteckning XK-12 USB Switch Interface har gott om återförsäljare i Sverige. I skrivande stund finns den exempelvis på Direktronik.se med artikelnummer 25-8210 och Funktionsverket.se med namnet Kontaktlåda USB och artikelnummer 651202.



Knappar

SPRIDA levererade tidigare knappsats och knapplåda med knappar av typen Tash Cups. Inom hjälpmedelsområdet finns det gott om alternativa knappar.

Primärt säljs dessa av återförsäljare inom hjälpmedelsområdet. Kontakta lokal hjälpmedelscentral eller hjälpmedelsleverantör för råd och stöd på området.

I tidigare lösningar har fem knappar fästs på en list av hårdplast eller trä med kardborreband med självhäftande tejp undertill. Det gör det lätt att flytta om, ta bort eller lägga till knappar.



Installation

XK-12 USB Switch Interface ansluts på valfri USB port på datorn. Låt Windows själv hitta drivrutin och ha anslutning till internet så att drivrutin hittas via Windows Update. Detta är testat för Windows 7 SP1 samt Windows 10 64-bitars.

Vänta tills drivrutinerna installerats och starta sedan Sarepta 2. Då ska knapparna fungera. Testkör annars knapparna på det sätt som beskrivs längre fram i detta dokument

Att tänka på

Stöd för XK-12 är inbyggt i Sarepta 2, så man behöver inga speciella drivrutiner eller programvara. Vid test har det visat sig att installation av programvara ifrån xkeys.com kan leda till dubbeltryck eller andra felaktigheter i användning.

Om XK-12 ansluts till annan USB ingång så kan den behöva leta upp drivrutinerna igen.

COM-port behöver inte väljas med XK-12.

Sarepta startar med två ikoner för Switchsend igång, en för den gamla typen av knappsats och en för nya SwitchSend XKeys.




SwitchSendXKeys

Gå in i **Inställningar** genom att klicka på ikonen



I Inställningar, under fliken Verktøy, väljer man SwitchSend XKeys

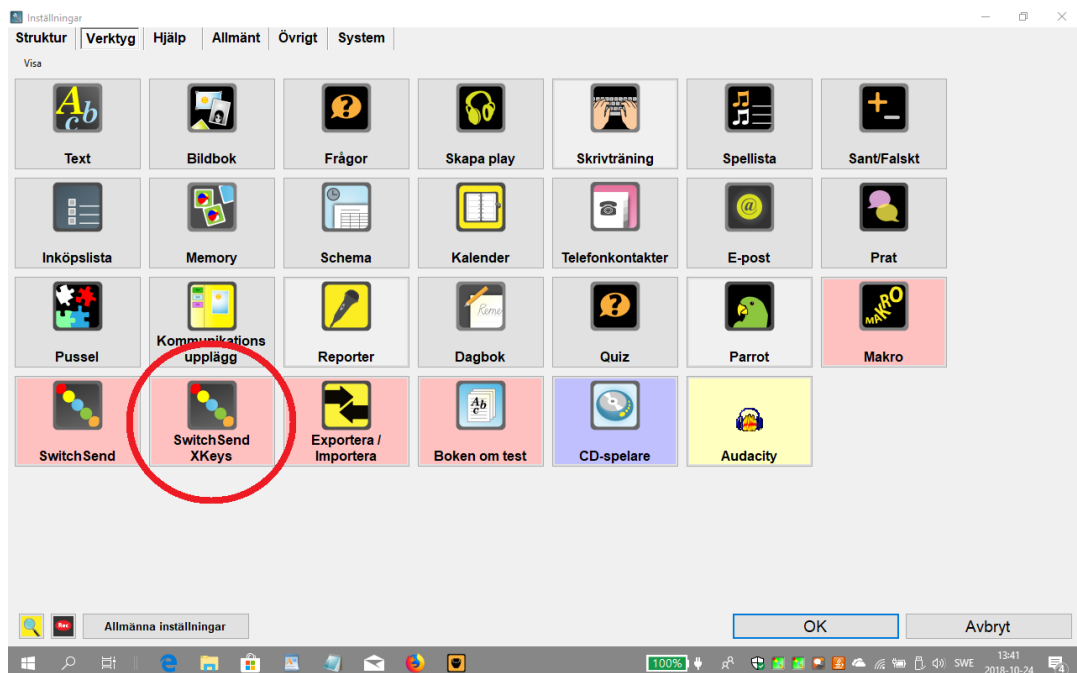




Gå in under fliken
Allmänna inställningar.


Tryck på knapparna på
knappsatsen.

Blinkar motsvarande
knapp här nere fungerar
knappsatsen.

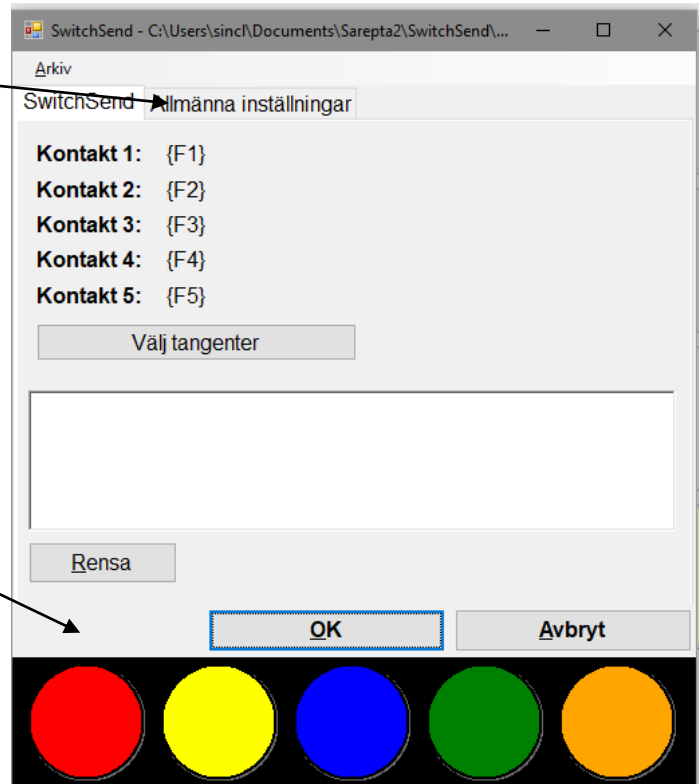


Som grundinställning är
SwitchSend XKeys inställd
för Sarepta med F1-F5.
Om man behöver använda
knappsatsen till att styra
andra program kan man
programmera om
knappsatsen så den styr
andra funktioner just där.

Vill man göra det går man
in under fliken **SwitchSend**
och klickar på knappen
Välj tangenter.

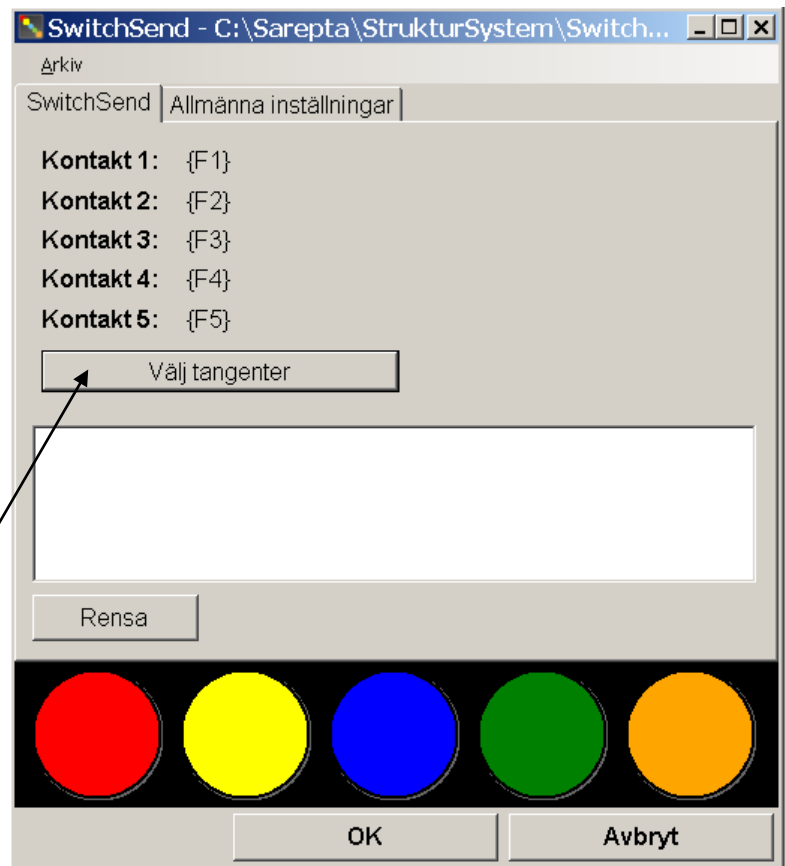



Då öppnas detta fönster. Markera den kontakt du vill ska få en annan funktion.

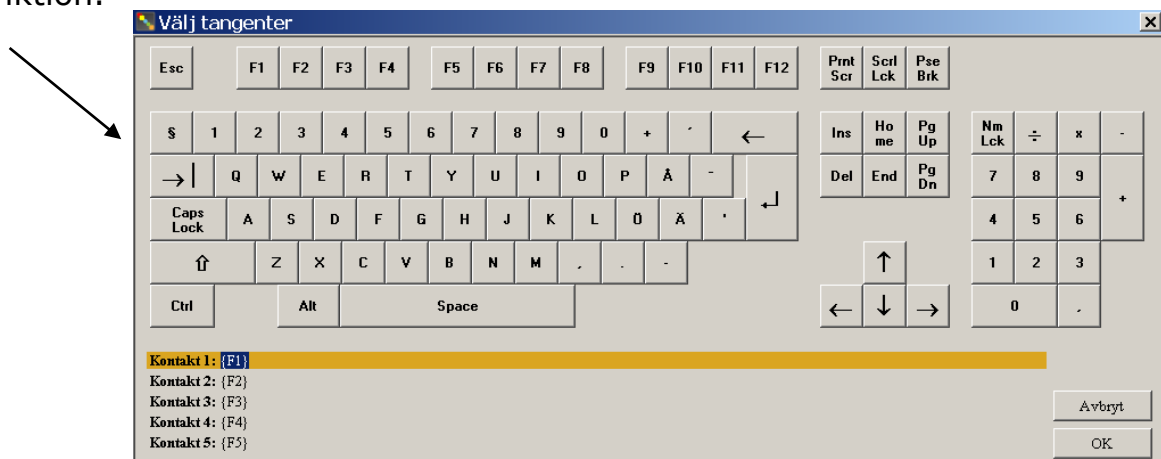

Klicka sen på den funktionen du vill välja. Det kan t.ex. vara olika knappar för att ta sig runt på Internet eller spela något spel.

Den förinställda funktionen kommer stå kvar. Radera den om den inte ska vara med.

Klicka på OK när du är klar. **OBS!** Tänk på att vissa kombinationer av knapptryck har annan funktion i andra program.

När du är klar går du till Arkiv **Spara som** och döper filen till det den skall fungera till t.ex. **Harpan** om den ska fungera mot det spelet.